

Brava[®]

 **Coloplast**

pl Pasta w paskach

Wypełnia zagłębienia/fałdy skórne

Opieka stomijna



Coloplast A/S
Hofveddam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użycia

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

23340845 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022-01-27

Przeznaczenie

Brava Pasta w paskach służy do wypełniania nierówności/fałd na nieuszkodzonej skórze wokół stomii. Zapewnia uszczelnienie między stomią a przylepcem/płytką stomijną, chroniąc skórę przed działaniem treści jelitowej lub moczowej.

Ostrzeżenia

Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego co potencjalnie może doprowadzić do zakażenia miejscowego.

Przetwarzanie, mycie, dezynfekcja i/lub sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.

Środki ostrożności

Ten produkt jest niejałowy i należy zachować ostrożność przy jego stosowaniu u wcześniaków lub niemowląt w inkubatorach, gdyż może zwiększać ryzyko wystąpienia zakażenia.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Produkt należy przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.


Informacje

Jeśli wymagana jest mniejsza ilość niż cały pasek, wystarczy odciąć żądaną ilość z paska. Jeśli wymagana jest większa ilość pasty, można ścisnąć razem palcami dwa paski pasty.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać podczas stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Sposób użycia


Przygotowanie

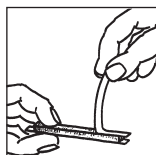

Upewnić się, że skóra wokół stomii jest czysta i sucha. Chwycić turkusową kłapkę i pociągnąć, aby ją otworzyć.

Wyjąć pastę w paskach. Zdjąć folię ochronną. Pasek pasty jest teraz gotowy do założenia.

Stosowanie

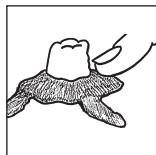

Umieścić pastę w paskach na nierówności skóry. Docisnąć pastę do skóry. Pasta musi wypełnić całe wgłębienie/fałd, aby powierzchnia pasty i skóry była na tym samym poziomie.

Przed rozpoczęciem modelowania pasty, w celu ułatwienia jej stosowania, można zwilżyć palce wodą. Następnie założyć sprzęd stomijny.

Usuwanie

Pastę można usunąć ze skóry w dowolnym czasie. Zwykle na skórze nie pozostają żadne resztki, ponieważ pasta jest usuwana ze skóry wraz z przylepcem.

Utylizacja

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy splukiwać produktu w toalecie.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Do jednorazowego użyciu



Wskazuje kod z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym urządzenia



(Global Trade Item Number)
Globalny numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Tą stroną do góry



Opakowanie nadające się do recyklingu



Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego