

SenSura[®] Mio Concave

Worek stomijny Concave

Jednoczęściowy worek
urostomijny



Instrukcja użycia

Przeznaczenie

Worek stomijny jest przeznaczony do zbierania treści ze stomii. Samoprzylepna płytka jest zamocowana do worka stomijnego i ma przylegać do zdrowej skóry wokół stomii.

Wskazania

To urządzenie jest przeznaczone dla osób ze stomią.

Ostrzeżenia

Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.

Przetwarzanie, mycie, dezynfekcja i/lub (re)sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.

Informacje

Jednorazowy worek urostomijny.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ można go bezpiecznie używać w środowisku rezonansu magnetycznego.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Specjalne warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.


Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Sposób użycia

Przygotowanie

1

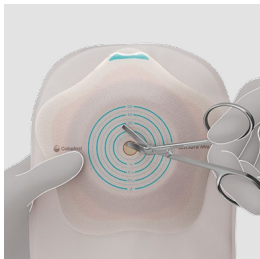

Za pomocą małych, zakrzywionych nożyczek i miarki na przylepcu, wytnij otwór w przylepcu, który będzie dokładnie dopasowany do wielkości i kształtu stomii.


Aby zmierzyć wielkość i kształt stomii, użyj dołączonej miarki stomijnej.

Stomia może zmieniać kształt, dlatego jej pomiar należy wykonać wtedy, gdy jest największa. Bardzo często ma to miejsce w pozycji siedzącej.

Dokładne dopasowanie otworu do stomii jest niezmiernie ważne, gdyż zmniejsza ryzyko podciekania i problemów ze skórą.

Zamknij zatyczkę ujścia w dolnej części worka stomijnego.


2

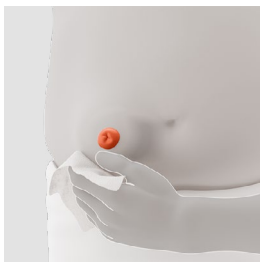

Dokładnie umyj stomię i skórę wokół niej. Przed nałożeniem przylepca skóra musi być całkowicie sucha.


Stosowanie

3

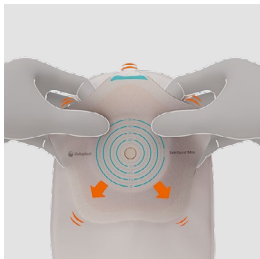


Odegnij wszystkie 5 płatków/ramion, aby przygotować przylepiec do założenia.

4

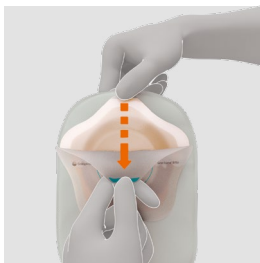


Zdejmij folię ochronną z przylepca.

5

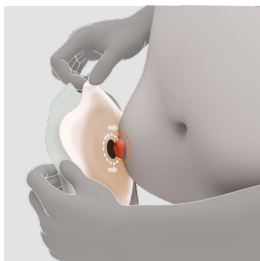

Chwyć przylepiec z płatkami/ramionami odgiętymi do tyłu. Przyłóż środkową część przylepca wokół stonii. Delikatnie dociśnij środkową część do skóry. Następnie dociśnij płatki/ramiona wokół obszaru wypukłego.

6

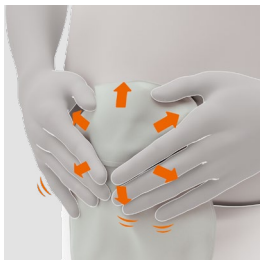


Mocno dociśnij przylepiec do skóry od środka na zewnątrz.

7



Palcem wskazującym odszukaj miękki pierścień stabilizujący otaczający stomię. Delikatnie dociśnij przylepiec między pierścieniem a stomią (lub bezpośrednio pierścień stabilizujący), aby się upewnić, że środkowa część przylepca szczelnie przylega do skóry.

8

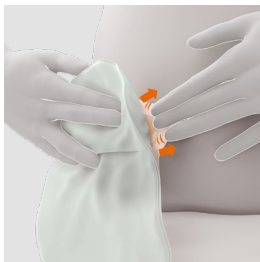

Dociśnij przylepiec od środka na zewnątrz w kilku kierunkach, aby go dobrze przymocować do skóry wokół stomii.



Instrukcja używania dostępna jest również
w postaci materiału wideo

Aby obejrzeć instruktażowy materiał wideo, należy zeskanować kod QR lub
odwiedzić stronę internetową

<http://www.coloplast.pl/concave1uro>

Opróżnianie

9



Przytrzymaj kurek ujęcia skierowany ku górze i ściśnij jego zewnętrzny koniec. Wyjmij kurek, a następnie zwolnij uścisk na ujęciu i opróżnij worek. Po całkowitym opróżnieniu worka, upewnij się, że jego ujęcie zostało ponownie szczelnie zamknięte w pełni wciśniętym kurkiem.

10



Ujście można schować w kieszonce z przodu, aby zapewnić większą wygodę i dyskrecję.
(Dotyczy tylko worków z tekstylną przednią częścią).

Zdejmowanie



Delikatnie zdejmij worek, pociągając za umieszczone na przylepcu uszko do usuwania, w kierunku od brzucha i powoli zwijając przylepiec w dół.

Delikatnie przytrzymaj skórę wolną dłonią, aby ułatwić zdejmowanie.

Utylizacja

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy wyrzucać go do toalety.

Postępowanie w przypadku nawracających problemów



Przylepiec nie przylega odpowiednio do skóry

Postępuj zgodnie z instrukcją zakładania opisaną w niniejszej ulotce i przed założeniem upewnij się, że skóra jest całkowicie czysta i sucha. Bardzo ważne jest, aby przylepiec w pełni przylegał do wszystkich nierówności na skórze. Dociśnij przylepiec podczas jego zakładania, aby go dobrze przymocować.



Skóra pod przylepcem jest zaczerwieniona i/lub podrażniona

Podrażnienie skóry może mieć różne przyczyny. Może być spowodowane wyciekami związanym z użyciem nieodpowiedniego sprzętu stomijnego lub nieodpowiednim rozmiarze docięcia. Może być także spowodowane nieodpowiednim czyszczeniem lub nagłym usunięciem przylepca, mogącym doprowadzić do podrażnienia skóry. Jeśli skóra jest zaczerwieniona, wówczas może być pomocne użycie środka do usuwania przylepca. Należy omówić ten problem z pielęgniarką stomijną najszybciej, jak to możliwe.



Podciekanie pod przylepiec

Podciekanie może mieć różne przyczyny. Może być spowodowane zmianą kształtu ciała lub wysokości stomii, a także nieprawidłowym założeniem przylepca. Zalecamy skorzystanie z narzędzia on-line BodyCheck do oceny profilu ciała, dostępnego na stronie internetowej www.bodycheck.coloplast.com, aby sprawdzić, czy profil ciała się nie zmienił. Jeśli się zmienił, wówczas może być konieczne użycie innego sprzętu stomijnego lub produktu dodatkowego. Bardzo ważne jest, aby omówić ten problem z pielęgniarką stomijną najszybciej, jak to możliwe.



Trudności z usunięciem folii ochronnej

Bardzo ważne jest, aby przed usunięciem folii odgiąć wszystkie pięć płatków. Zapoznaj się z instrukcją usuwania opisaną w krokach 3 i 4 w niniejszej ulotce lub obejrzyj instruktażowy materiał wideo dostępny na stronie internetowej <http://www.coloplast.pl/concave1uro>



Po założeniu przylepca jego powierzchnia jest często pozaginana lub pomarszczona

Upewnij się, że płatki są mocno i równomiernie przymocowane na wszelkich wypukleniach, wygładzając pomarszczone powierzchnie i mocno dociskając je do skóry. W razie dalszych trudności zalecamy skorzystanie z narzędzia on-line BodyCheck do oceny profilu ciała, dostępnego na stronie internetowej www.bodycheck.coloplast.com, aby sprawdzić, czy inny produkt nie jest bardziej odpowiedni do profilu ciała.

Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Do jednorazowego użytku



Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia



(Global Trade Item Number)
Globalny numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Tą stroną do góry



Opakowanie nadające się do recyklingu



Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego



Coloplast A/S
Høtveddam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użycia

23325205 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy

Coloplast A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021-01-14



Coloplast