

SenSura[®]Mio



SenSura[®]Mio Convex

1-częściowy worek stomijny, otwarty

Opieka stomijna



Instrukcja użycia

23324197 Version 2

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021-01-25

Właścicielem marki Velcro[®] jest firma Velcro Industries B.V.

Przeznaczenie

Worek stomijny jest przeznaczony do zbierania treści ze stomii. Samoprzylepna płytka stomijna jest zamocowana do worka stomijnego i ma przylegać do zdrowej skóry wokół stomii.

Wskazania

To urządzenie jest przeznaczone dla osób ze stomią.

Ostrzeżenia

Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.

Ponowne przetwarzanie, mycie, dezynfekcja i/lub (re)sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko obrażeń ciała lub zakażenia użytkownika.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu typu convex należy się skonsultować ze swoim pracownikiem służby zdrowia.

Informacje

Jednorazowy worek stomijny.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ go bezpiecznie używać w środowisku rezonansu magnetycznego.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.


Specjalne warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywać z dala od światła słonecznego.


Sposób użycia

Przygotowanie

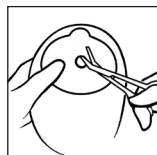


Za pomocą małych, zakrzywionych nożyczek i miarki na przylepcu, wytnij otwór w przylepcu, który będzie dokładnie dopasowany do wielkości i kształtu stomii. Aby zmierzyć wielkość i kształt stomii, można użyć dołączonej miarki stomijnej.


Dokładne dopasowanie otworu do stomii jest niezmiernie ważne, gdyż zmniejsza ryzyko podciekania i problemów ze skórą.

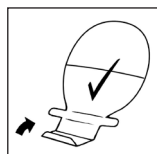


Umieść worek na płaskiej powierzchni, stroną z przylepcem zwróconą do dołu. Zamknij ujście, zawijając trzy razy jego dolną część ku górze, tak aby było widać rzep Velcro[®].

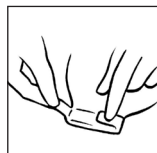


Zegnij dwie turkusowe zakładki do wewnątrz, aby zapiąć rzep Velcro[®].

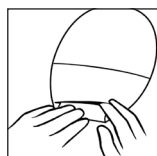

Ujście można schować, używając znajdującego się bezpośrednio nad nim punktowego rzepu Velcro[®] lub przy użyciu podłużnego rzepu Velcro[®] pośrodku worka.

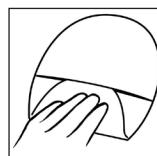

(Nie dotyczy worków przezroczystych, pośrodku których nie ma rzepu Velcro[®]).

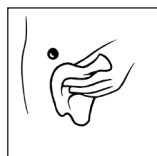


Dokładnie umyj stomię i skórę wokół niej. Przed nałożeniem przylepca skóra musi być całkowicie sucha.

Stosowanie



Zdejmij folię ochronną z przylepca.

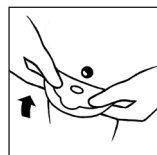


Wygładź przylepiec w okolicy stomii i dociśnij do skóry. Przylepiec powinien ściśle przylegać do stomii. Ważne jest zapewnienie ścisłego uszczelnienia, co pomoże zapobiegać podciekaniu treści jelitowej pod przylepiec. Dociśnij przylepiec zaczynając od obszaru przy stomii, aby zapewnić mocne przyleganie. Upewnij się, że przylepiec szczelnie przylega. Wygładź przylepiec palcami, przesuwając nacisk od stomii w kierunku zewnętrznych krawędzi, celem zapewnienia idealnego dopasowania przylepca ze skórą.



Dociśnij worek, aby zapewnić mocne przyleganie i idealne dopasowanie przylepca do skóry wokół stomii.

Opróżnianie worka

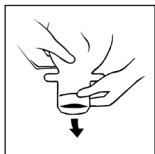


Gdy zajdzie potrzeba, otwórz ujście i opróżnij worek do toalety.



Oczyść ujście, na przykład przy użyciu papieru toaletowego. Po opróżnieniu worka zwiń i zamknij z powrotem ujście.

Zdejmowanie

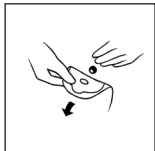

Delikatnie zdejmij worek, pociągając za uszko do usuwania na przylepcu w kierunku od brzucha i powoli zwijając przylepiec w dół. Delikatnie przytrzymaj skórę wolną dłonią, aby ułatwić zdejmowanie.

Utylizacja

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i można go utylizować wraz z odpadami komunalnymi.


Nie należy wyrzucać opatrunku do toalety.

Naklejka filtru



W razie potrzeby, aby zapobiec odprowadzaniu gazów, umieść na filtrze jedną z dołączonych naklejek.

Pasek mocujący

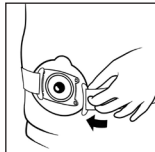

Pociągając za paski wyreguluj pasek mocujący do obwodu talii. Nie ma potrzeby usuwania materiału pokrywającego sprzączkę. Zamocuj każdy z czterech zaczepów do jednego z czterech uszek paska mocującego po obu stronach płytki stomijnej. Zaczni od przodu i delikatnie dociśnij do brzucha. Następnie odciągnij zaczepy paska od łączenia, aż wskoczą na miejsce, wydając dźwięk kliknięcia.

(Dotyczy tylko produktów z pętlami na paski).

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Do jednorazowego użytku



Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia



(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Tą stroną do góry



Opakowanie nadające się do recyklingu



Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego